

카티세이브 펫 제품 특징

사용 방법

사용 전 준비사항

- ✓ 사용 전까지 멸균 상태 유지
- ✓ 멸균된 상태에서 개봉
- ✓ 사용 직전 실온에서 30분 정도 'Cold shock' 방지 단계를 거침

사용 방법



알루미늄 실의 뚜껑 제거

바이알을 뒤집고 주사기의 피스톤을 뒤로 당겨 내용물 1ml을 취함

관절강 내에 투여



제품명	Cartisave Pet, 카티세이브 펫
분류	애완동물용 의료기기(4등급)/콜라겐 조직 보충제
주성분	돼지 연골 유래 아텔로 콜라겐 (Atelocollagen)
포장단위/규격	1 바이알 (1ml)/ 1 Box
보관방법	밀봉 상태로 냉장보관 (2~8 °C), 사용기한 24개월
사용목적	(내외과적) 처치 및 수술시 결손 또는 손상된 연골을 보충하기 위하여 사용하는 콜라겐 함유 물질
유효기간	제조일로부터 24개월 신청 완료
투여횟수	2주 간격, 2회/6개월
사용방법	0.1mL/kg
투여방법/주의사항	돼지 유래 제제에 과민한 환축의 경우 사용금지 관절강 외에 제품이 누출되면 동통을 일으킬 우려가 있으므로 관절강 내에 확실히 투여